


SUNSTAR
gelX[®]
SPRAY ORALE
100 ml

Trattamento e prevenzione della mucosite orale

La mucosite e la stomatite sono infiammazioni della cavità orale, normalmente accompagnate da lesioni eritematose e a volte da lesioni ulcerative che sono particolarmente dolorose, tanto da rendere difficile la masticazione e l'ingestione.

GelX[®] SPRAY ORALE ha un'azione meccanica indicata per la gestione del dolore e per il sollievo del dolore: aderisce alla superficie della mucosa della bocca e lenisce le lesioni causate da chemioterapia e/o radioterapia. Non contiene alcol.

ISTRUZIONI PER L'USO: Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, rimuovere il cappuccio di protezione e applicare lo spruzzatore dopo aver rimosso la plastica protettiva. Dirigere la cannula orientabile verso la lesione all'interno della bocca e nebulizzare per tre volte (fare riferimento al disegno).

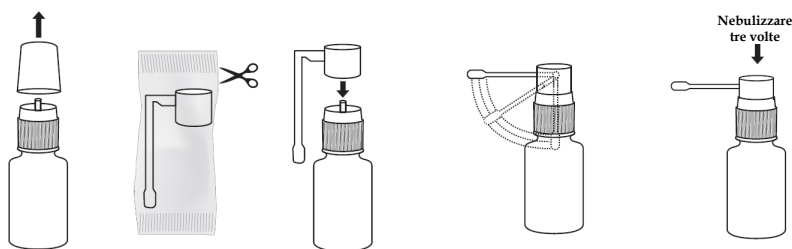

Ripetere tre volte al giorno. Evitare l'ingestione di qualsiasi sostanza, solida o liquida, per almeno un'ora dopo ciascuna applicazione.

Ingredienti: Acqua, saccarina sodica, PVP (6%), taurina, zinco gluconato, olio di ricino idrogenato peg-40, pullulano, aroma. Non usare il prodotto in caso di allergia nota a uno qualsiasi degli ingredienti.

Avvertenze e precauzioni: Non usare se la confezione è aperta o danneggiata o dopo la data di scadenza. Non ingerire il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non sono disponibili dati per l'uso durante la gravidanza, l'allattamento, e nei bambini al di sotto dei 2 anni di età. Conservare a temperatura inferiore a 30°C, lontano dal calore diretto.

In caso di problemi durante il trattamento, interrompere l'uso e consultare il medico. Non sono disponibili dati in relazione all'uso concomitante di farmaci, consultare il medico.









Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione a **GelX[®] SPRAY ORALE** deve essere segnalato al fabbricante e all'Autorità competente locale.

CE 0476



BMG Pharma S.p.A, Viale Restelli 1, 20124 Milano, Italia.

Distribuito in Italia da
Sophos Biotech srl

| | |
|--|--|
|  30°C | Conservare a temperatura inferiore a 30°C |
|  | Numero di lotto |
|  | Data di scadenza |
|  | Identificazione Univoca del Dispositivo |
|  | Dispositivo Medico |
|  0476 | Marcatura CE rilasciata dall'Ente Notificato 0476 |
|  | Vedere il foglio illustrativo prima di usare il prodotto |
|  | Fabbricante |

| | |
|--|--------|
| POMPA | PI |
| Raccolta indifferenziata | |
| SCATOLA | PAP 21 |
| FOGLIO ILLUSTRATIVO/ETICHETTA | PAP 22 |
| FLACONE | GL 72 |
| SPRUZZATORE | O 07 |
| Raccolta differenziata | |
| Verificare le istruzioni dell'amministrazione locale | |

Rev.2, 20 aprile 2023